

# Modo de empleo

## Protector fluidizado para talón

z-flex

# Tortoise

Protección para talón

### Configuración adecuada: SUN DAP600z



**Correa ajustable:** Correas de ajuste para adaptarse a diversos tamaños de piernas.

**Abertura:** Provides easy access to foot without removing the boot. Adjustable for different foot sizes.

**Correa para caída del pie:** Ofrece una protección moderada frente a la caída del pie.


**Apertura:** Apertura para inspeccionar el talón mientras se está usando Z-Flex.

### Modo de empleo:

Se recomienda leer todas las instrucciones antes de usar. Use según le haya indicado el médico. Siga siempre el protocolo de su centro con respecto a la protección del talón.



1. Extraiga el Z-Flex de la bolsa.

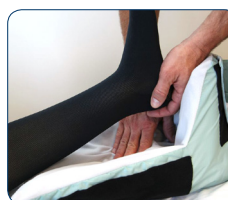

2. Abra todas las correas del Z-Flex y coloque el pie y la pantorrilla en la bota con el talón centrado en la apertura. El posicionador fluidizado debe soportar suavemente el tendón de Aquiles proximal al tobillo.



3. Cierre las correas ajustables comenzando con la correa más cercana a la rodilla y continúe hasta el pie. Las correas son elásticas para adaptarse a la forma de la pierna. Asegúrese de que estén bien fijadas pero no demasiado apretadas. Debe ser capaz de deslizar un dedo entre la bota y la pierna para confirmar un ajuste preciso.



4. Abroche ambos lados de la correa para caída del pie. El pie debe estar en alineación neutra.



5. Para abrir la abertura de caída del pie, desabroche la correa para caída del pie que está situada en la parte lateral de la bota con las correas ajustables. Cuando cierre la bota, cierre suavemente la abertura alrededor del pie y después abroche las correas exactamente tal como lo hizo cuando la puso por primera vez.

#### Instrucciones para limpieza:

Limpie con un desinfectante hospitalario aprobado.

Para información sobre la garantía, vea [sundancesolutions.com](http://sundancesolutions.com)

Este producto es para uso únicamente en un solo paciente.



N.º de patente  
N.º de patente de EE.  
UU. 8,858,478 B2



Todas las líneas y tubos deben salir a través de la apertura para las correas de la bota como se observa en las fotos. No corra ninguna línea ni tubo en el costado de la pierna hacia afuera través de la apertura del talón.

**sundance**  
solutions

79 Primrose Street • White Plains, NY 10606  
877.560.9871 • Fax: 914.946.2955

